

aquece[®]
aquecedores



RMC IND BRAS DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI

CNPJ: 04.716.276/0001-21 - IE: 168.124.531.114
Rua Ramira Moreira Siqueira, 239 - Jd. Moreirinha - Amparo
São Paulo - Brasil - SAC: 19 3808.5224 - sac@rmc.ind.br
Produzido por: CNPJ 14.491.588/0001-38



Aquecedor
Eletrônico
Inteligente

Aquecedores Eletrônicos - 1 ou 3 cavidades / Aquecedore Stander Line - 1 cavidade

Os Aquecedores Aquece RMC ELETRÔNICOS tem a finalidade de aquecer gel, óleos de massagem, cremes ou água, proporcionando assim um maior conforto aos seus pacientes, utilizado em clínicas médicas, fisioterapia, estética e etc.

Instalação

Antes de ligar o equipamento observe se a tensão da rede elétrica é compatível com a tensão do aquecedor Aquece Eletrônico (110 V OU 220 V). Instale o equipamento em superfície plana e seca. Não deixar objetos em cima do aquecedor.

Instruções de Uso

1. Conecte o cabo de força à rede elétrica observando a voltagem indicada na parte traseira do equipamento.
2. Ligue a chave liga/desliga também localizada na parte traseira do aquecedor Aquece.
3. Ao ligar a chave liga/desliga acenderá um led azul e um vermelho localizado na parte frontal do equipamento.
4. O led azul aceso indica que o equipamento está ligado e o led vermelho aceso indica que o equipamento está aquecendo.
5. Posicione o potenciômetro localizado na parte traseira do equipamento na potência máxima.
6. Coloque o produto a ser aquecido em frascos cheios na cavidade de aquecimento do equipamento.
7. Após 40 minutos ligado, verifique a temperatura do produto com termômetro ou fazendo o teste de contato.
8. A temperatura esperada após 40 minutos é de 40 a 45° C para o gel. Esta é uma temperatura confortável para aplicação dos produtos. Para outros produtos como óleos e águas, ajustar o tempo conforme sua necessidade.
9. Para manter a temperatura e evitar superaquecimento, posicione o potenciômetro localizado na parte traseira do equipamento na potência média (posição central entre a mínima e a máxima).
10. Neste momento o led vermelho apagará quando o equipamento já atingiu sua temperatura de trabalho, se necessário aguarde esfriar até a temperatura desejada ou aumente a temperatura caso deseje uma faixa temperatura maior.

INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES**Cuidados e Advertências****SEMPRE OBSERVE A TEMPERATURA DO GEL, ÓLEOS DE MASSAGEM, CREMES OU ÁGUA ANTES DE APLICAR NO PACIENTE.**

- Após o uso desligue o aquecedor Aquece Digital.
- Mantenha as cavidades do aquecedor sempre limpo. Para realizar a limpeza do aquecedor verifique se o mesmo está desconectado da rede elétrica.
- Utiliza um pano levemente umedecido com água.
- Não molhe ou mergulhe o equipamento em água ou qualquer outro tipo de solução. Isso pode causar danos ao equipamento ou choques elétricos.
- Nunca coloque água nas cavidades destinadas a aquecimento.
- Para evitar superaquecimento do produto, utilize os frascos sempre cheios.
- Utilize somente recipientes de material de alta densidade. Dê preferência aos frascos da RMC Gel Clínico.

Especificações

- **Capacidade:** 01 frasco de 270 ml para os equipamentos de 01 cavidade.
- **Capacidade:** 03 frascos de 270 ml para o equipamento de 03 cavidades.
- **Tensão:** 110 Volts OU 220 Volts.
- **Potência:** 25 W.
- **Controle de temperatura:** Através de placa eletrônica proporcionando ajuste fino de aquecimento.
- **Garantia:** 01 Ano contra defeitos de fabricação.

Aparelho nº: _____

Standard Line
1 cavidade.**NÃO possui regulador
de temperatura.**Eletrônico
1 cavidade.**POSSUEM regulador
de temperatura.**Eletrônico
3 cavidades.